




**Contour
next
EZ**
Sistema para análisis
de glucosa en sangre

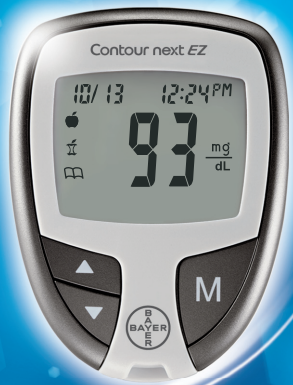

NO NECESITA CÓDIGO™

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Medidor CONTOUR®NEXT EZ



Botones de desplazamiento Arriba/Abajo

Puerto para la tira reactiva

Use exclusivamente la tira reactiva CONTOUR®NEXT

Extremo gris: Introduzca este extremo en el puerto para la tira reactiva.

Punta para muestra: La muestra de sangre se recoge aquí.

Botón de memoria
(Encender/ Apagar, Recuperar la memoria, Validar)

Análisis básico

Prepararse para realizar un análisis


1. Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

2. Introduzca el extremo gris de la tira reactiva en el puerto para la tira reactiva del medidor.




3. El medidor se enciende y aparece la imagen de una tira reactiva con una gota de sangre parpadeante, que indica que el medidor está listo para realizar el análisis.


4. Saque la cápsula de punción del dispositivo de punción MICROLET®2.

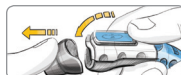


5. Afloje la cubierta protectora redonda de la lanceta mediante un giro de ¼, pero no la retire.

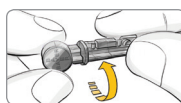

6. Introduzca con firmeza la lanceta hasta que se detenga completamente y el dispositivo se vuelva a configurar.

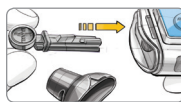


7. Gire la cubierta protectora de la lanceta para separarla.

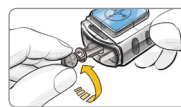

8. Vuelva a colocar la cápsula de punción antes de extraer la gota de sangre.




9. Ajuste el cilindro de graduación de la cápsula de punción a la profundidad de punción preferida.

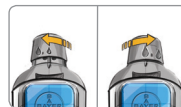

PRECAUCIÓN: El medidor CONTOUR®NEXT EZ y el dispositivo de punción MICROLET®2 están diseñados para su uso en un solo paciente.

Extracción de la gota de sangre

1. Presione la cápsula de punción firmemente contra la yema del dedo y presione el botón azul de expulsión con el dedo pulgar.

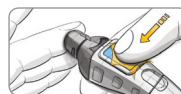

2. Masajee la mano y el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota de sangre.

Realizar el análisis de sangre


1. Use exclusivamente las tiras reactivas CONTOUR®NEXT con el medidor CONTOUR®NEXT EZ.

2. Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. La sangre se recoge en la tira reactiva.


3. Mantenga la tira reactiva en contacto con la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.

4. El resultado aparece en pantalla después de 5 segundos.

5. Para apagar el medidor, simplemente extraiga la tira reactiva. Deseche la tira reactiva como residuo médico.

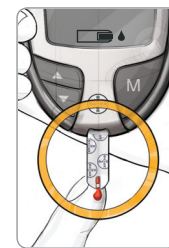


Análisis en la yema de los dedos

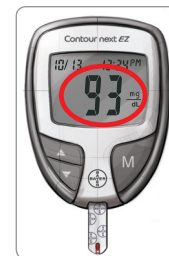


Para sacar la lanceta usada

1. Sujete el dispositivo de punción con el dedo pulgar sobre la ranura de sujeción y la cápsula de punción como muestra la figura. Saque suavemente la cápsula de punción.

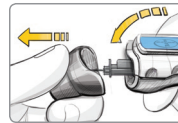

2. Coloque la cubierta protectora redonda de la lanceta sobre una superficie plana con el logotipo de Bayer orientado hacia abajo.

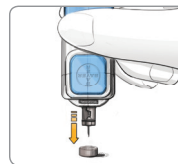

3. Con la lanceta usada todavía en el dispositivo de punción, clave la aguja de la lanceta en el centro del lado expuesto de la cubierta.

4. Tire la lanceta en un contenedor siguiendo las instrucciones del folleto del dispositivo de punción.

5. Vuelva a colocar la cápsula de punción.

Consulte la guía del usuario de CONTOUR®NEXT EZ y el folleto de MICROLET®2 para obtener instrucciones completas.

¿Necesita ayuda? 1-800-348-8100
(disponible 24 horas al día,
7 días a la semana)

www.bayercontour.com

Posible riesgo biológico

Se considera que todos los sistemas de medición de glucosa en sangre representan un posible riesgo biológico.

Todos los productos y objetos que entren en contacto con la sangre humana deberán manipularse, incluso después de limpiarlos, como potenciales transmisores de enfermedades víricas.

El medidor y el dispositivo de punción están diseñados para el uso por un solo paciente. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia!

Se considera que todas las partes del kit presentan un posible riesgo biológico y podrían transmitir enfermedades víricas, incluso después de haberlas limpiado y desinfectado.

Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Uso del modo avanzado

Configuración del medidor en modo avanzado

Para configurar el medidor en modo avanzado y sacar ventaja de los marcadores de comida y otras funciones disponibles:

1. Presione **M** para encender el medidor.
2. Pulse y mantenga presionado ▲ o ▼ durante 3 segundos.
3. L-1 parpadea.
4. Pulse ▲ o ▼ para cambiar a L-2.
5. Pulse **M** para establecer la configuración.






Averigüe cómo estas funciones adicionales pueden ayudarle a controlar la diabetes.

Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bayer Diabetes Care en el 1-800-348-8100 (disponible 24 horas al día, 7 días a la semana).

www.bayercontour.com

Después de realizar un análisis y ver los resultados, use los marcadores en pantalla:

Cómo Marcar Los Resultados >	Verá >	Para Configurar >	Verá >	Lo Que Significa >
Antes de las comidas Marca el resultado de un análisis que se ha realizado antes de comer. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse M		El resultado se ha marcado como análisis antes de las comidas. Pulse M de nuevo para configurar un recordatorio que le recuerde que debe realizar un análisis después de comer.
Después de las comidas Marca el resultado de un análisis que se ha realizado después de comer. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse M		El resultado se ha marcado como análisis después de las comidas.
Registro Marca un resultado como único o diferente por algún motivo. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse M		El resultado se ha marcado en la memoria como único. Debe anotarlo en su registro.



Configure un recordatorio (preconfigurado en 2 horas) para realizar un análisis después de las comidas. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas sobre el uso de los marcadores y ajuste de las horas recordatorio.

Uso Del Recordatorio

Cuando suena el recordatorio, el medidor se enciende y puede ver el resultado del análisis antes de comer.






Pulse cualquier botón una vez para silenciar el recordatorio y dos veces para apagar el medidor.

Realice otro análisis de sangre y márkelo como análisis después de las comidas (consulte la tabla de la izquierda).

Códigos de error y símbolos

Consulte la guía del usuario para obtener una lista completa de los códigos de error.

E1 	Temperatura fuera del rango.
E2 	Hay un problema con la recogida completa de sangre en la tira reactiva. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.
E3 	El medidor detecta una tira reactiva usada o se ha utilizado una solución de control errónea. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.
E11	Resultado anormal. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.



Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA
www.bayercontour.com

Bayer

84037096
Rev. 06/12